


## NOTICE D'UTILISATION

1




Barrette à chignon, fil de fer ou trombone nécessaire

2

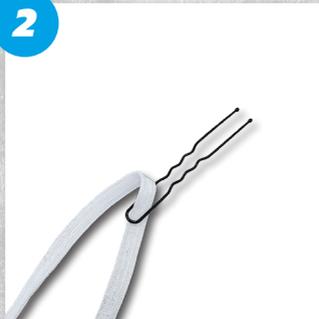

Placer la barrette à l'intérieur de l'élastique

3

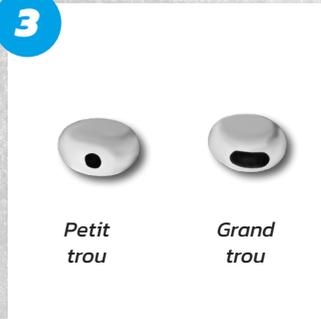


Petit trou

Grand trou


Insérer le bloqueur caoutchouc par le plus grand trou

4

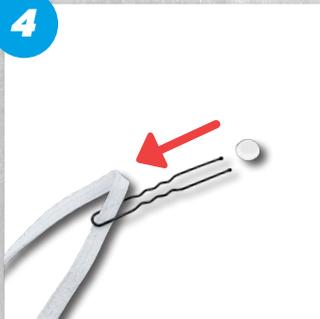


Introduire la barrette dans le bloqueur caoutchouc

5

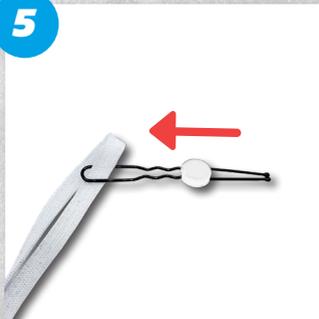

Faire descendre le bloqueur le long de la barrette...

6

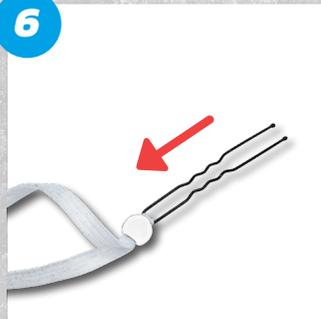

...jusqu'à l'élastique

7



Le bloqueur caoutchouc est en place

8



Positionner le masque sur le visage

9



Coulisser et régler le bloqueur jusqu'à un maintien optimal

**i** Pour une plus grande longévité des bloqueurs caoutchouc, il est recommandé de les ôter lors de chaque passage en machine.